

## Proving it every day


Mölnlycke® offre soluzioni innovative per la gestione delle ferite, il miglioramento della sicurezza e dell'efficienza chirurgica e la prevenzione delle ulcere da pressione. Soluzioni che aiutano a ottenere risultati migliori e sono supportate da evidenze cliniche e di health-economics.

In tutto ciò che facciamo, siamo guidati da un unico scopo: aiutare gli operatori sanitari a dare il meglio di sé. E ci impegniamo a dimostrarlo ogni giorno.

References: 1. Avance Solo CMM Data on file [ref 10]. 2. Avance Solo CMM Data on file [ref 18]. 3. Avance Solo CMM Data on file [ref 23]. 4. Avance Solo CMM Data on file [ref 15]. 5. Avance Solo CMM Data on file [ref 17]. 6. Anette Svensson Henriksson. Single use negative pressure wound therapy (suNPWT) system with controlled fluid management technology – an evaluation of performance. Wounds International 2021. Vol 12 Issue 4. 7. PICO 7 IFU Doc # 18701577 12822, Date of issue; 2018-03, PICO 14 IFU Doc # 18505254 22308, Date of issue; 2019-12. 8. Avelle IFU Doc # 5122 16F, Date of issue; 2019-01. 9. Van Overschelde P, et al. A randomised controlled trial comparing two wound dressings used after elective hip and knee arthroplasty. Poster presentation at the 5th Congress of WUWHS, Florence, Italy, 25-29 Sep, 2016. 10. Silverstein P, et al. An open, parallel, randomized, comparative, multicenter study to evaluate the cost-effectiveness, performance, tolerance, and safety of a silver-containing soft silicone foam dressing (intervention) vs silver sulfadiazine cream. J Burn Care Res. 2011;32(6):617-626. 11. Gee Kee EL, et al. Randomized controlled trial of three burns dressings for partial thickness burns in children. Burns. 2015;41(5):946-955. 12. David F, et al. A randomised, controlled, non-inferiority trial comparing the performance of a soft silicone-coated wound contact layer (Mepitel One) with a lipidocolloid wound contact layer (UrgoTul) in the treatment of acute wounds. International Wound Journal, 2017.

Scopri di più su [www.molnlycke.it](http://www.molnlycke.it)

Scopri di più su [www.molnlycke.it](http://www.molnlycke.it)  
Mölnlycke Health Care, Via Marsala 40/C, Gallarate(VA), Italia.  
Phone + 49 0331714011. I marchi, i nomi e i loghi Mölnlycke  
Avance e Safetac sono registrati globalmente da una o più  
società del gruppo Mölnlycke Health Care. ©2020 Mölnlycke  
Health Care AB. Tutti i diritti riservati.

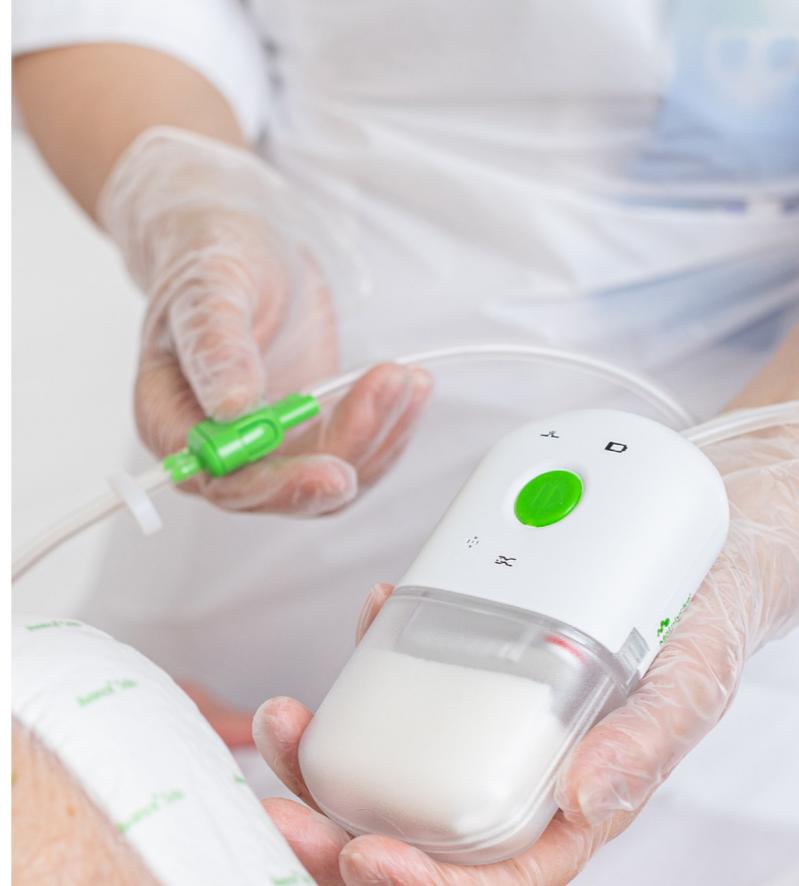

## Pressione costante. Per una cura costante.

Per saperne di più sui nostri sistemi NPWT monouso Avance® Solo e Avance® Solo Adapt su [www.avancesolo.it](http://www.avancesolo.it)

## Avance® Solo – uso normale

Display acustico e visivo	Funzionamento	Descrizione	Commento
	<b>Autocontrollo Automatico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>La pompa si attiva per un breve periodo</li> <li>Tutti gli indicatori luminosi della pompa lampeggiano a turno</li> <li>La pompa emette segnali acustici: frequenza media seguita da frequenza alta.</li> </ol>	L'autocontrollo automatico viene eseguito quando le batterie vengono inserite correttamente nella pompa e conferma che la pompa è pronta per l'uso.
	<b>Modalità Terapia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>All'avvio della pompa, il pulsante verde di avvio lampeggia una volta al secondo per 15 minuti.</li> <li>Durante il normale funzionamento, il pulsante verde di avvio lampeggia due volte al minuto.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Per confermare il raggiungimento della corretta pressione negativa</li> <li>Per confermare il corretto funzionamento della pompa e il mantenimento della terapia.</li> </ol>
	<b>Modalità Pausa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>La pompa emette due brevi segnali acustici.</li> <li>Le notifiche acustiche si ripetono ogni 15 minuti, finché la terapia è in pausa.</li> </ol>	Per confermare che la pompa e la terapia sono state messe in pausa. Dopo 60 minuti la pompa riavvia automaticamente la terapia.
	<b>Fine della terapia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tutti gli indicatori luminosi lampeggiano ad alta intensità</li> <li>La pompa emette tre segnali acustici: uno alto, uno medio seguito da un tono a bassa frequenza.</li> </ol>	Il tempo di terapia di 14 giorni è completo.
	<b>Pressione del tasto non valida</b>	La pompa emette un breve segnale acustico	In caso di pressione non valida del tasto.

## Allarmi e risoluzione dei problemi

Display acustico e visivo	Cause possibili	Descrizione	Commenti
	<b>Allarme di perdita</b> La pressione negativa non viene stabilita a causa di una perdita d'aria nel sistema.	<ol style="list-style-type: none"> <li>La spia di perdita lampeggia una volta al secondo.</li> <li>Se la pressione negativa non viene mantenuta: <ul style="list-style-type: none"> <li>l'indicatore luminoso di perdita d'aria rimane attivo, lampeggiando una volta al secondo.</li> <li>La pompa emette ripetutamente un allarme acustico.</li> <li>La pompa sospende la terapia</li> </ul> </li> </ol>	Per correggere una perdita, eseguire una o più delle seguenti operazioni: Premere intorno al bordo della medicazione per migliorare il contatto con la cute o, aggiungere ulteriori strisce di fissaggio intorno ai bordi della medicazione. Assicurarsi che il contenitore sia saldamente collegato alla pompa o che il tubo sia saldamente collegato al contenitore. Per correggere un blocco, eseguire una o più delle seguenti operazioni: Assicurarsi che il tubo non sia bloccato o che non sia attorcigliato. Se la tanica è piena, sostituirla seguendo le istruzioni per la sostituzione della stessa.
	<b>Blocco Allarme</b> La pressione negativa non viene stabilita a causa di un blocco.	<ol style="list-style-type: none"> <li>La spia di blocco lampeggia una volta al secondo.</li> <li>Se la condizione di blocco persiste <ul style="list-style-type: none"> <li>l'indicatore luminoso di blocco rimane attivo, lampeggiando una volta al secondo</li> <li>La pompa emette ripetutamente un allarme acustico</li> <li>La pompa sospende la terapia</li> </ul> </li> </ol>	Per eliminare un'ostruzione, eseguire una o più delle seguenti operazioni: Assicurarsi che il tubo non sia bloccato. Assicurarsi che il tubo non sia attorcigliato. Se il canister è pieno, sostituirlo seguendo le istruzioni per la sostituzione del canister.
	<b>Allarme batteria scarica</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>La spia della batteria lampeggia una volta ogni cinque secondi quando sono rimaste fino a 24 ore di autonomia.</li> <li>Quando rimangono meno di 4 ore di autonomia <ul style="list-style-type: none"> <li>l'indicatore luminoso della batteria rimane attivo, lampeggiando una volta al secondo</li> <li>la pompa emette ripetutamente un allarme acustico</li> </ul> </li> </ol>	Per correggere un allarme di batteria scarica: Sostituire le batterie seguendo le istruzioni. Utilizzare solo il tipo e il modello di batterie al litio specificate per questo prodotto da Mölnlycke Health Care, vedere la sezione 8 dell'IFU per operatori sanitari, incluso nella confezione del prodotto.
	<b>Allarme guasto interno</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Le spie di segnalazione per la perdita, la batteria e blocco lampeggiano contemporaneamente una volta al secondo</li> <li>La pompa emette ripetutamente un allarme acustico.</li> </ol>	La pompa ha un guasto interno e non può essere avviata. Contattare il proprio medico curante o Mölnlycke Health Care.

## Avance® Solo Pocket guide

La vostra guida al nostro sistema di terapia a pressione negativa monouso per incisioni chirurgiche chiuse



Avance® Solo  
Porta a casa la guarigione



# Una terapia costante ed efficace. Senza compromessi.

## Avance® Solo per le ciNPT

Avance® Solo é un sistema portatile a pressione negativa monopaziente<sup>1</sup>, che mira a promuovere la guarigione, a migliorare la mobilità del paziente e a ridurre le complicanze del sito chirurgico, come le SSI. È indicato per l'uso su incisioni chirurgiche chiuse dopo interventi ortopedici, cardiotoracici, ostetrici, generali/colorettali, vascolari e plastici.


## Avancesolo.it

Visita ora il sito web di Avance Solo per informazioni complete sul prodotto, testimonianze, casi di pazienti, video didattici e altro ancora.



## Pressione negativa costante e regolata

La Controlled Fluid Management (CFM) Technology™ é una combinazione di flusso d'aria controllato, medicazione assorbente e canister distale, che consente al sistema Avance Solo NPWT di fornire una pressione negativa continua regolata.<sup>1-3</sup>

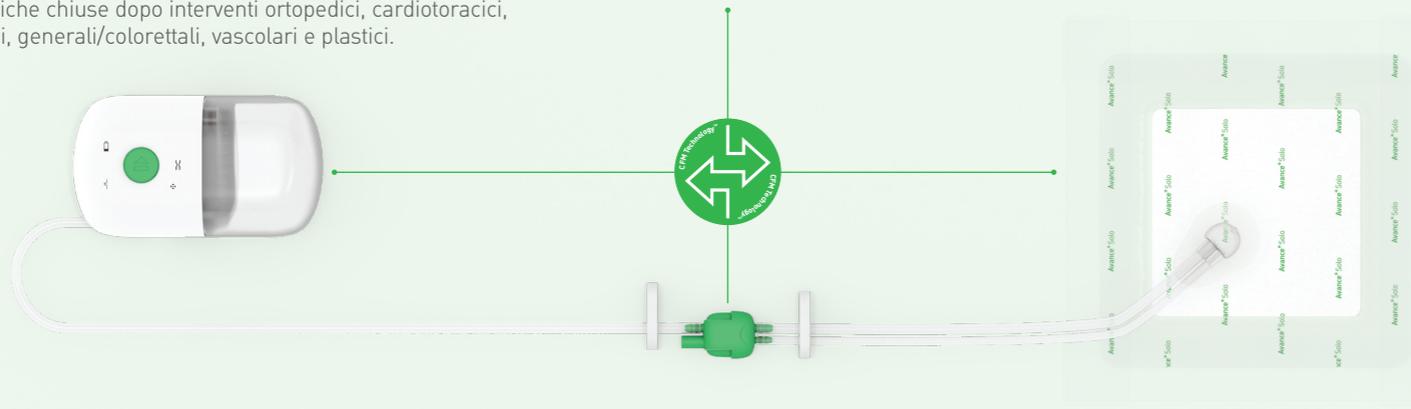

- ✓ Fornisce una pressione negativa di 125 mmHg per 14 giorni senza diminuire la capacità di assorbimento della medicazione<sup>4-5</sup>
- ✓ L'attivazione ripetitiva della pompa garantisce il mantenimento della pressione negativa, mentre l'aria viene fatta circolare per rimuovere il fluido in eccesso e trasferirlo al canister.<sup>1,4,5</sup>

- ✓ In un modello di ferita che simula una ferita moderatamente essudante, i sistemi di pressione negativa monouso senza canister hanno dimostrato un calo nell'erogazione della prevista pressione negativa dopo 1,5-2,5 giorni. In confronto, Avance® Solo ha mantenuto la pressione negativa prevista fino a 7 giorni.<sup>6-8</sup>
- ✓ È stato dimostrato che l'adesivo Safetac® della medicazione Avance® Solo riduce al minimo il trauma sul sito della ferita e sulla cute circostante al momento della rimozione della medicazione<sup>9-12</sup>.

## Guida all'applicazione di Avance® Solo


Per istruzioni, avvertenze e precauzioni complete, consultare il manuale d'uso (IFU per professionisti sanitari) incluso nella confezione del prodotto.



Collegare il canister alla pompa spingendo il canister fino a quando non scatta su entrambi i lati. Fissare il tubo del canister nel morsetto posteriore.



Inserire le batterie nel vano batterie della pompa. Assicurarsi che il terminale positivo (contrassegnato da +) e il terminale negativo (contrassegnato da -) di ciascuna batteria corrispondano all'etichetta +/- del vano batterie. Chiudere il vano batterie facendo scorrere il coperchio in posizione. Quando le batterie sono inserite correttamente, la pompa esegue un autocontrollo automatico.

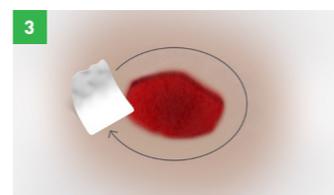

Prima di applicare la medicazione, detergere la ferita e la cute circostante e asciugare. Eliminare o coprire i bordi taglianti e i frammenti ossei con uno strato di contatto con la ferita non aderente, a causa del rischio di perforazione di organi o vasi sanguigni durante la pressione negativa. Documentare l'uso dello strato di contatto con la ferita nelle note del paziente.




Rimuovere il pezzo centrale della pellicola di supporto e applicarlo sulla ferita. Una volta applicato, rimuovere i due pezzi rimanenti della pellicola di supporto. Fare attenzione a eliminare pieghe o grinze.



Per iniziare la terapia, collegare innanzitutto i due connettori verdi, che si adattano a un solo orientamento. Assicurarsi che i tubi non siano bloccati.



Quindi, tenere premuto il pulsante verde di avvio della pompa e rilasciarlo dopo due (2) secondi in modo che la pompa si attivi e il pulsante verde di avvio lampeggi. La pressione negativa deve essere raggiunta entro due (2) minuti dall'avvio della pompa.

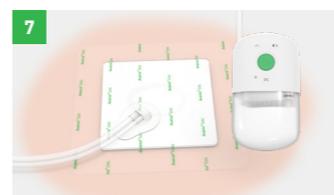

A questo punto si sentirà la pompa in funzione e si potrà osservare la contrazione della medicazione, poiché la pressione negativa è stata raggiunta e mantenuta. Se la pressione negativa è difficile da raggiungere, regolare la medicazione o premere intorno alla medicazione per migliorare il contatto con la pelle. Fare attenzione ad evitare grinze e spazi vuoti nel bordo della medicazione.



Una volta raggiunta una pressione negativa, applicare le strisce di fissaggio fornite con la medicazione, per evitare perdite d'aria. Durante la terapia, prestare attenzione ai segnali acustici o visivi emessi dalla pompa. Per un elenco di tutti i segnali e il loro significato, consultare il retro del fascicolo.

## Cambiare il canister



Può essere necessario sostituire periodicamente il canister. A tale scopo, mettere in pausa la pompa premendo il pulsante verde di avvio e rilasciarlo dopo due (2) secondi. La pompa emette due segnali acustici per confermare la modalità di pausa.



Far scorrere i morsetti del tubo vicino ai connettori verdi e spingere entrambi i morsetti sul tubo per garantire che non vi siano perdite di fluido durante lo scollegamento. Scollegare il tubo del canister dal tubo della medicazione stringendo il connettore da entrambi i lati e staccandolo.



Rimuovere il canister premendo i pulsanti a molla su entrambi i lati e tirando. Sostituire il canister scollegato con uno nuovo spingendo il contenitore finché non scatta su entrambi i lati e si blocca in posizione.



Per continuare la terapia, collegare il tubo del canister al tubo della medicazione, rilasciare il morsetto sul tubo della medicazione e riavviare la pompa premendo il pulsante verde di avvio, rilasciandolo dopo due (2) secondi.

Nota: se si desidera coinvolgere il paziente nella terapia cambiando il canister, assicurarsi che la tecnica sia dimostrata precedentemente e che il paziente abbia una capacità adeguata per questo compito.